



# MANUEL D'UTILISATION

## POMPE D'ALIMENTATION ENTÉRALE AMIKA

**AVANT ET APRÈS LE PASSAGE DU PRODUIT DE NUTRITION, IL EST INDISPENSABLE DE RINCER SOIGNEUSEMENT LA SONDE AVEC DE L'EAU, À L'AIDE D'UNE SERINGUE DE GAVAGE.**

### MISE EN PLACE DE LA TUBULURE

- 1) Connecter la tubulure à la poche d'alimentation en s'assurant que le clamp soit bien fermé.
- 2) Déverrouiller la porte de la pompe au moyen du levier. Ouvrir la porte.
- 3) En respectant le sens de la flèche, placer le clamp de sécurité dans son logement.
- 4) Faire passer la tubulure sur le mécanisme d'entraînement et la fixer dans le guide en s'assurant qu'elle n'est pas distendue.
- 5) Refermer la porte de la pompe. Veiller à ce qu'elle s'enclenche bien.


### MISE EN MARCHÉ

- 1) Allumer la pompe en appuyant quelques secondes sur la touche ON/OFF.

### PURGE DE LA TUBULURE

- 1) Pour afficher le menu Purge, appuyer une fois sur la touche Purge.
- 2) Une fois le menu affiché, appuyer sur la touche Marche.
- 3) Lorsque la purge est terminée, appuyer de nouveau sur Marche.

### PROGRAMMATION DE LA POMPE

- 1) Réglage du débit : appuyer sur les touches + et - en face de la valeur signalée par  jusqu'à obtenir la valeur souhaitée.
- 2) Réglage du volume cible (facultatif) : appuyer sur les touches + et - en face de la quantité affichée en mL jusqu'à obtenir la quantité à administrer.

### DÉMARRAGE DE LA NUTRITION

- 1) Après purge de la tubulure et programmation du débit, appuyer sur la touche Marche pour débiter l'administration de la nutrition.

### ARRÊT DE LA NUTRITION

- 1) Pour interrompre l'administration de la nutrition, appuyer sur la touche Arrêt.
- 2) Maintenir la touche ON/OFF appuyée pendant une seconde pour éteindre la pompe.
- 3) Penser à maintenir la pompe branchée sur secteur pour recharger la batterie.